

Cavitron® Jet SPS™

Détartreur ultrasonore 30Kz et aéropolisseurCavitron® Jet SPS™ avec technologie SPS™


Unité de prophylaxie complète réunissant un détartreur 30Kz et un aéropolisseur dans un même boîtier. Le Cavitron® Jet SPS™ est équipé de la technique brevetée révolutionnaire SPS™, dotée de composants électroniques spéciaux intégrés qui stabilisent la fréquence et l'activité de l'extrémité de la pointe de l'insert, à tous les niveaux de puissance, même en présence de tartre tenace. Pour augmenter le confort du patient, une gamme de faible puissance, " Blue Zone ", permet le détartrage sous gingival. Une fonction de stimulation par la pédale de commande, " Booster ", assure une sur-puissance temporaire pour le retrait des dépôts de tartre tenace. Cette opération ne demande aucune manipulation sur le boîtier de contrôle et s'effectue sans quitter le champ de travail. Le Cavitron® Jet SPS™ est équipé d'une seule pièce à main pour le détartrage et l'aéropolissage. La

sélection de la fonction souhaitée s'effectue rapidement en adaptant l'insert désiré, sans manipulation sur le boîtier de contrôle.

En position aéropolissage il est possible de régler le débit de poudre suivant l'importance des colorations et de procéder au rinçage et au séchage de la zone traitée en agissant simplement sur la pédale de commande. Grâce à un jet d'air, d'eau et de bicarbonate parfaitement concentré, le retrait des colorations se réalise rapidement et avec un confort maximum pour le patient. Le polissage à air a prouvé depuis de nombreuses années son efficacité dans l'élimination des dépôts et de contrôle de la plaque dentaire, en orthodontie et en restauration pour les collages et dans bien d'autres applications.

Prophylaxie Parodontale Professionnelle

DENTSPLY : POUR LA SANTÉ DES DENTS

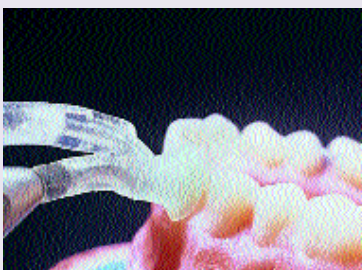

“ Booster “

Une sur-puissance temporaire peut être actionnée en appuyant plus fortement sur la pédale de commande. Utilisée lors de présence de tartre très tenace, cette sur-puissance s'effectue sans quitter le champ de travail et en continuant le traitement. Le contrôle visuel de la mise en sur-puissance est indiqué par l'illumination du voyant jaune situé sur la droite du boîtier de commande.

Une seule pièce à main

La sélection de la fonction désirée se réalise rapidement par la mise en place de l'insert de prophylaxie pour un détartrage ou par l'insert buse pour le polissage. Aucun réglage n'est nécessaire d'une fonction à l'autre. En fonction polissage, par l'intermédiaire de la pédale de commande, il est possible d'obtenir un spray d'eau uniquement, un spray air/eau/poudre et jet d'air seul sans rien actionner.

Caractéristiques

Poids : 2,6 Kg
Hauteur : 10,2 cm
Largeur : 18,7 cm
Profondeur : 24,1 cm
Longueur câble P.A.M : 2 m

Raccordement : Air, Eau, Electricité
Appareil livré avec : 1 insert 30K TFI 10,
1 insert 30K TFI 3,
1 insert buse, 4 sachets de poudre
Prophy Jet Dentsply

Débit de poudre réglable

Pour obtenir un retrait rapide des colorations et en fonction de leur importance il est possible de régler le débit de poudre. Incorporé sur le bouchon du réservoir de poudre, le réglage permet de réguler l'incorporation du bicarbonate et de ne consommer que la quantité de poudre nécessaire.

Jet Shield™

Système à usage unique pour la réduction de nébulisation, Jet Shield s'adapte sur la buse des aéropolisseurs Dentsply. De mise en place simple et rapide, le Jet Shield est raccordé à une aspiration ou à une pompe à salive.