

Dual Select™ Cavitron®

Distributeur de liquides médicamenteux



Choisissez votre solution

Le distributeur Dual Select™ est spécialement conçu pour fournir facilement des médicaments ou de l'eau purifiée aux détartreurs à ultrasons Dentsply Cavitron®, Cavitron® SPS™, Cavitron™ Jet SPS™ et pour les systèmes Prophy Jet®. Ce système complémentaire permet aux cliniciens de choisir entre l'utilisation de l'alimentation en eau du cabinet et la création d'un système d'alimentation de liquides médicamenteux en circuit fermé réservé au détartrage ultrasonique, au débridement parodontal et aux procédures de polissage à l'air.

L'alimentation en circuit fermé de liquides médicamenteux ou d'eau purifiée évite l'utilisation de l'eau du cabinet et réduit les risques de contamination par biofilm pendant le polissage à l'air, le débridement parodontal ou lors de procédures chirurgicales parodontales. Le Dual Select™ est équipé de 2 flacons de 500 ml dont la sélection est aisée. Il suffit de tourner le bouton de sélection sur la position A ou B pour choisir la solution souhaitée ou de se positionner sur Open H₂O pour bénéficier de l'alimentation en eau externe comme source d'irrigation.



Simple et rapide

La mise en place et le retrait des flacons s'effectuent simplement et sans effort. L'ouverture du capot de l'appareil coupe l'alimentation en air dans les flacons et entraîne une dépressurisation. Le Dual Select™ peut se positionner sur ou à côté de l'appareil auquel il est raccordé : Cavitron® SPS™, Cavitron™ Jet SPS™, Prophy Jet®



Choix du liquide

La sélection des liquides se réalise en tournant simplement le bouton vers la position A ou B pour une alimentation en circuit fermé. La position Open H₂O permet l'irrigation avec l'eau de l'alimentation du cabinet. Cette position peut être utilisée pour rincer l'ensemble des circuits de l'appareil auquel est raccordé le Dual Select™.



Flacon de 500 ml

La contenance de 500 ml et la disponibilité de 2 flacons fournissent une quantité de liquide suffisante pour toute la durée d'un traitement parodontal.



Caractéristiques

Poids : 1,9 Kg
Hauteur : 26 cm
Largeur : 20,3 cm
Profondeur : 22,9 cm
Raccordement : Eau, Air
Appareil livré avec : 2 flacons de 500 ml pour les solutions et 1 flacon de 500 ml pour le nettoyage

Produits recommandés

- * Chlorhexidine
- * Chlorure de cétylpyridinium
- * Huiles essentielles
- * Peroxyde d'hydrogène, 3% USP
- * Iodine de povidone, solution à 10%
- * Solution saline
- * Eau stérile