

PoGo™

Nouvelles formes
Pour toutes les situations cliniques

1 seul instrument !
1 seule étape !
1 résultat exceptionnel !



Instrument de polissage diamantés en une seule étape

Issues de la même technologie brevetée que les disques PoGo, **les nouvelles cupules et pointes PoGo** permettent désormais de polir les composites dans **toutes les situations cliniques**.

PoGo a été conçu pour apporter un **poli incroyable** sur **tous les composites**, même les hybrides les plus durs.


Alors que d'autres systèmes de polissage nécessitent plusieurs étapes et de longues minutes, **PoGo** vous permet de polir en **un seul geste et en très peu de temps**.

Avec les instruments diamantés PoGo, vos restaurations brillent de mille feux, en un rien de temps.

Oubliez les étapes multiples !
Une seule suffit !



Une technique simple et rapide :

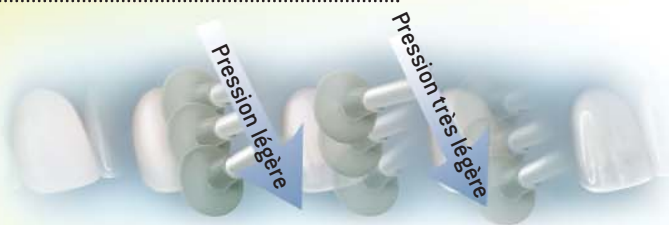

PoGo doit être utilisé avec une vitesse de rotation située entre 7 500 et 20 000 tours / minute.

Effectuez la finition de la restauration de manière à lui donner sa forme définitive et une surface lisse et sans défaut.

Commencez le polissage avec la face large et plate de **PoGo**.

Procédez par pressions légères et intermittentes.

Avec les disques, terminez par de petits mouvements de ponçage pour obtenir le brillant optimal.

Choisissez :

- les disques **PoGo** pour les surfaces vestibulaires et les angles libres.
- les pointes **PoGo** pour les surfaces occlusales postérieures et les surfaces linguales concaves
- les cupules **PoGo** pour les zones cervicales et proximales convexes.



Conditionnements PoGo :

- 662025Y : Boîte de 10 disques, 10 cupules, 10 pointes
- 662010Y : Boîte de 30 disques
- 662022Y : Boîte de 30 pointes
- 662023Y : Boîte de 30 cupules


PoGo™

Instruments de polissage diamantés en une seule étape


Changez votre façon de polir ...

- 1 seul instrument
- 1 seule étape
- 1 poli exceptionnel
- Quel que soit le composite ou le compomère utilisé.

Comparaison d'états de surface :

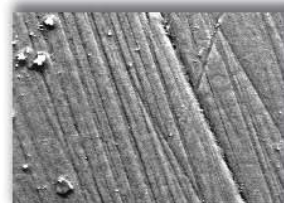

Autre système

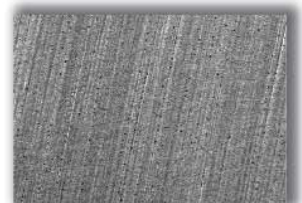

Avec PoGo

Résultats de poli de l'émail avec **PoGo** par rapport à un autre système.



Avant



Après

Les solutions DENTSPLY pour la restauration postérieure



x e n o® III Adhésif automordançant universel

x-flow Matériau fluide de restauration universelle

QUI X FIL Composite postérieur monocouche à faible taux de rétraction

Esthet-X™ Composite microhybride à technologie H.D.N

The Palodent System Système de matrices sectorielles