

ProphyJet® Cavitron®



Aéropolisseur



Confort et efficacité

Le Prophy Jet® est un appareil d'aéropolissage permettant d'ôter rapidement, avec précision et sans dommage pour les tissus durs ou mous, toutes les colorations présentes à la surface de l'émail et dans les espaces inter dentaires. Grâce à un jet d'air, d'eau et de bicarbonate parfaitement contrôlé et concentré, le nettoyage prophylactique est précis, rapide et avec le maximum de confort pour le patient.

Depuis de nombreuses années le polissage à air a prouvé son efficacité dans l'élimination des dépôts, de la plaque dentaire, en orthodontie, dans la préparation des surfaces avant un collage, lors de la préparation des puits et fissures avant obturation et dans bien d'autres applications.

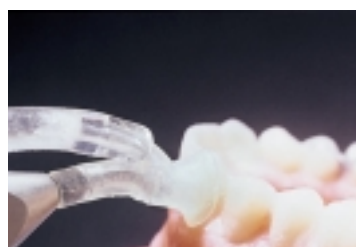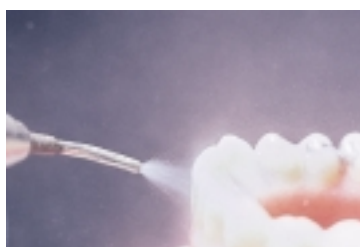

Confort

Le Prophy Jet est équipé d'un réchauffeur d'eau automatique pour le confort des patients. Dès la mise sous tension de l'appareil, un jet d'air permanent est actionné pour éviter le bouchage des circuits. Ce jet d'air permet également de chasser l'eau à la surface de l'émail, après un aéropolissage, sans avoir recours à la seringue à air. Pédale de commande à 3 positions : air - air et eau - air, eau et bicarbonate.

Débit de poudre réglable

Pour obtenir un retrait rapide des colorations, et en fonction de leur importance, il est possible de régler le débit de poudre. Positionné sur la façade de l'appareil, le bouton de réglage est facilement accessible. Ce réglage permet de réguler l'incorporation du bicarbonate et de ne consommer que la quantité de poudre nécessaire.

Poudre

Pour une utilisation et un résultat optimum n'utiliser que la poudre DENTSPLY PROPHY JET. Mentholée et de granulométrie spécifique, la poudre Prophy Jet garantit à votre appareil, efficacité et durabilité.

Jet Shield™

Système à usage unique pour la réduction de nébulisation, Jet Shield s'adapte sur la buse des aéropolisseurs Dentsply. De mise en place simple et rapide, le Jet Shield est raccordé à une aspiration ou à une pompe à salive.

Caractéristiques

Poids : 5.4 Kg
Hauteur : 10.2 cm
Largeur : 18.7 cm
Profondeur : 24.1 cm
Longueur câble P.A.M : 2 M
Raccordement : Air, Eau, Electricité
Appareil livré avec : 1 insert buse, 4 sachets de poudre Prophy Jet Dentsply

Angles de travail

