

# Esthet·X™

## *Restauration directe des formes et des volumes des incisives latérales naines.*



Sourire de face.  
Situation initiale.



1<sup>er</sup> apport : application de la teinte "opaque" A2-O



2<sup>ème</sup> apport avec la teinte de corps A2



3<sup>ème</sup> apport : teinte translucide GE, gris opalescent



Finition et polissage à l'aide des pointes Enhance



Polissage avec les cupules à polir Enhance et les pâtes Prisma Gloss F et Extra fine



Résultat final



# DENTSPLY

*Source d'inspiration et d'action*

# Esthet.X™

micro matrix restorative



Vue occlusale pré-opératoire



Préparation de la cavité



Mordançage des bords d'émail (15s)



Mordançage de la dentine (15s), en continuité du mordançage amélaire



Application du Prime&Bond NT en brossant les surfaces



Application du matériaux Esthet.X teinte de corps A2



Une couche de teinte translucide Esthet.X YE est appliquée

**DENTSPLY**

*Source d'inspiration et d'action*

# Esthet·X™

micro matrix restorative



Enfant de 12 ans  
Fracture de classéV



Dent reconstitué avec  
les teintes de corps A2  
et A3



Reconstitution des formes  
et contours avec  
une fraise diamantée



Un translucide YE est  
déposé sur le 1/3  
incisal



Polissage avec le  
système Enhance



Résultat final

**DENTSPLY**

*Source d'inspiration et d'action*