

Le guide **DENTSPLY** de

**photopolymérisation**

 **martLite™PS**



**DENTSPLY**

Source d'inspiration et d'action

**xeno**

adhésif automordançant universel

Teinte	Secondes
U	10

**Prime&Bond NT**

adhésif monocomposant à nanoparticules

Teinte	Secondes
U	10

**Dyract AP**

compomère de restauration directe

2 mm*	
Teinte	Secondes
A2	10
A3	10
A3,5	20
A4	20
B1	10
B3	20
C2	20
C3	20
C4	20
O-A2	20
O-B3	20
I-B1	10
XL	10

**QUIXFIL**

composite postérieur monocouche

4 mm*	
Teinte	Secondes
U	10

**Spectrum**

composite hybride traditionnel

2 mm*	
Teinte	Secondes
A1	10
A2	10
A3	10
A3,5	10
A4	10
B1	10
B2	10
B3	10
C2	10
C3	10
C4	10
D3	10
O-A2	10
O-A3,5	20
I-B1	10

**DELTON FS+**

compomère fluide pour le scellement des sillons

2 mm*	
Teinte	Secondes
U	20

**ceram·x**

composite universel biomimétique

2 mm*	
Teinte	Secondes
M1	10
M2	10
M3	10
M4	20
M5	20
M6	20
M7	20

**x-flow**

composite fluide universel

2 mm*	
Teinte	Secondes
A2	10
A3	20
A4	20
B1	10
C2	10
TL	10
O-A3 (1mm)	30

**Dyract Seal**

résine fluide pour le scellement des puits et fissures

2 mm*	
Teinte	Secondes
translucide	10
blanc	30

**Esthet·X**

composite microhybride à technologie HDN

2 mm*	
Teinte	Secondes
A1	10
A2	10
A3	10
A3,5	10
A4	10
B1	10
B2	10
B3	10
DY	20
C1	10
C2	10
C3	10
C4	10
XGB	20
D2	10
D3	10
Universel	10
White	10
XL	10
Email WE	10
Email CE	10
Email YE	10
Email GE	10
Email AE	10
W-0	20
A2-0	10
A4-0	30
B2-0	20
C1-0	20
C4-0	30
D3-0	20