

Guide pour le Polissage des matériaux composites

Pour les restaurations antérieures et postérieures

Pour un résultat de bonne qualité	Etape 1 : utiliser...	une fraise diamantée de grain $\leq 30 \mu\text{m}$ sous spray d'eau à $\leq 200\,000$ tours/min		...jusqu'à ce que la surface de la restauration ait une apparence uniformément rugueuse
	Etape 2 : utiliser...	l'accessoire de finition Enhance® de votre choix : pointe, disque ou cupule. S'utilise à sec, à vitesse modérée, en exerçant une pression intermittente.		... jusqu'à ce que la surface soit lisse et sans défaut
Pour un résultat d'excellente qualité	Etape 3 : utiliser...	Prisma®-Gloss™ Fine à vitesse modérée. Utiliser à sec dans un premier temps, puis ajouter un petit peu d'eau.	Commencer le polissage avec la face large et plate de PoGo à une vitesse de rotation située entre 7 500 et 20 000 tours/min. Procéder par pressions légères et intermittentes : exercer tout d'abord une pression légère, puis très légère avec un mouvement de rotation. Terminer par de petits mouvements de ponçage pour obtenir le brillant optimal. Pogo s'utilise à sec.	...jusqu'à obtenir un aspect brillant parfaitement naturel.
	Etape 4 : utiliser...	Prisma®-Gloss™ Extrafine à vitesse modérée. Utiliser à sec dans un premier temps, puis apporter un petit peu d'eau.		...dans les cas où l'on souhaite un aspect très lustré, par exemple pour les restaurations de Classe IV

Accessoires de polissage Dentsply

Enhance® PoGo™

Enhance®

Instruments composite de finition et polissage

- Mandrin et partie travaillante monobloc : pas de mandrin métallique, aucun risque d'endommager la restauration
- Hygiénique : articles mono-patient
- 3 formes : disques, cupules et pointes pour les restaurations antérieures et postérieures
 - Pointes : idéales pour les surfaces occlusales postérieures et aux surfaces linguales concaves
- Cupules : idéales pour les zones cervicales et proximales inclinées
- Disques : idéales pour les surfaces vestibulaires et aux angles libres
- Poli parfait avec les pâtes Prisma®Gloss™ et Prisma®Gloss™ Extra Fine

Indications : finition et polissage de tous type de restaurations composites ou compomères



Pogo™

Instruments diamantés pour un polissage parfait en une seule étape

- Dispositif de polissage final diamanté pour un rendu parfaitement naturel
- Polit tous les composites, y compris les plus durs et les composites hybrides les plus récents
- Obtention d'un aspect lustré en moins d'une minute – sans pâte à polir ni eau
- Disponible en disques, cupules et pointes : pour toutes les situations cliniques

Indications : pour tous types de restaurations composite ou compomères

