

DENTSPLY

SDR™

La gamme

SDR™	Référence	Description	Conditionnement
	60603000	Kit intro SDR	Coffret contenant 45 Compu® de 0,25g, 1 pistolet applicateur, 1 flacon de 2,5ml d'adhésif automordançant Xeno V, 1 boîte de stockage.
	60603002	Recharge SDR	15 Compu® de 0,25g.

Pensez à nos composites universels pour le coffrage en dernier incrément !

Ceran X™ Mono+



Esthet X® HD



Spectrum® TPH3



DENTSPLY


SDR™

Protocole de restauration postérieure


Indications :




- Préparation préalable de la cavité
- Préparer la cavité de façon à ce qu'il ne reste aucun résidu d'amalgame ou de matériau de restauration et isoler la cavité de toute contamination.
- Dans le cas de restaurations de Classe II, mettre en place une matrice ainsi que des coins de bois en se référant au mode d'emploi du fabricant.
- Appliquer l'adhésif selon les directives du fabricant (adhésif chimiquement compatible avec les composites conventionnels à base de méthacrylates).
- Photopolymériser.

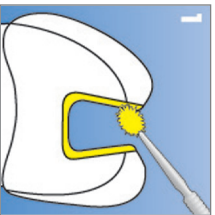


- 1.** Application de l'adhésif
Appliquer l'acide phosphorique suivi d'un adhésif ou bien appliquer un adhésif automondant.

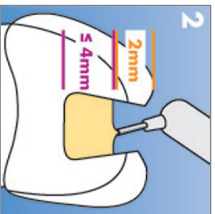

- 2.** Mise en place du matériau SDR
Appliquer SDR par incréments de 4mm. Préserver 2mm sous la marge cavo-supéficielle.

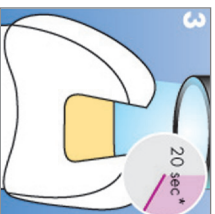

- 3.** Photopolymérisation
Photopolymériser les incréments de 4mm avec une lampe délivrant une intensité lumineuse d'au moins 550 mW/cm².

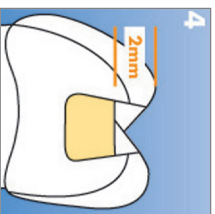

- 4.** Mise en place du composite de coffrage
Appliquer un composite de restauration conventionnel pour les 2mm restants.

Lire attentivement la notice d'utilisation.