




1
Suivant la taille de la cavité, déposer une ou deux gouttes de Xeno V dans un godet de mélange.



2
Dans le godet de mélange fourni par DENTSPLY en position fermée, Xeno V reste utilisable pendant 30 minutes.




3
Appliquer Xeno V en quantité suffisante, en imprégnant bien uniformément toutes les surfaces de la cavité.

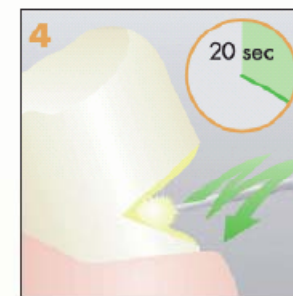

4
Frotter ensuite doucement pendant 20 secondes.



5a
Evaporer complètement le solvant à l'aide d'un jet d'air jusqu'à ce que l'adhésif soit figé, pendant au moins 5 secondes. Eviter les excès.

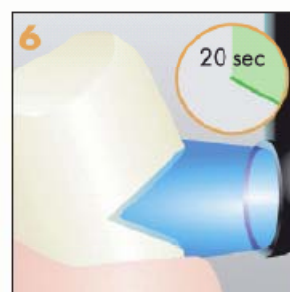

6
Photopolymériser pendant au moins 20s.
Intensité lumineuse min. halogène $\geq 500 \text{ mW/cm}^2$
Intensité lumineuse min. LED $\geq 800 \text{ mW/cm}^2$



7
Une fois la restauration achevée : démonter le godet de mélange DENTSPLY pour le nettoyage et la désinfection.

For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire