

FAQ Xeno III avec unidoses :

- Comment puis-je être sûr de l'homogénéité du mélange final ?
 - Liquides A et B précisément prédosés dans les réservoirs prévus à cet effet
 - Bien mélanger quelques secondes avec l'applicateur tips le mélange final
- Combien de cavités puis-je traiter avec une dose à usage unique ?
 - 1 grosse MOD
 - 3 petites cavités
- Les doses à usage unique me reviennent-elles plus cher que Xeno en flacon ?
 - Non, le prix au ml est identique
- Comment conserver l'adhésif si je souhaite utiliser Xeno pour traiter plusieurs cavités sur mon patient ?
 - En protégeant l'unidose de la lumière ambiante
 - Vous pouvez utiliser le couvercle orange de Calibra (fourni sur demande)