

# NETISPAD

## 1. PRESENTATION :

Carton de 3 flacons de 180 ml de solution prête à l'emploi.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION :

- Nettoyage et dégraissage des instruments dans les cabinets dentaires.
- Elimine la plupart des ciments de type résineux.

## 3. COMPOSITION :

- p. Mentha – 1,8 - diene
- Excipient aromatisé

## 4. MODE D'EMPLOI :

- Imprégner un non-tissé ou une compresse avec Netispad,
- Essuyer l'instrument souillé le plus rapidement possible,
- Si des traces de pâte demeurent sur l'instrument, envelopper la partie tâchée avec une compresse imprégnée de Netispad et laisser agir.

## 5. CONTRE-INDICATIONS :

- Ce produit ne doit pas être utilisé sur un patient.
- Ce produit est réservé au nettoyage des instruments.
- Éviter d'inhaler les vapeurs du produit.