

CIPROSPAD

Ciment d'obturation provisoire

Composition

Oxyde de zinc, copolymer, plâtre, sulfate de potassium, sulfate de zinc, phtalate de butyle

Propriétés

Ciment d'obturation provisoire auto-durcissant, prêt à l'emploi

- Bonne thixotropie pour s'adapter parfaitement aux parois des cavités.
- Sans action nocive pour la pulpe et la gencive grâce à son pH neutre.
- Aucune expansion de prise, due à l'utilisation de matières synthétiques de haute qualité.
- Joint absolument hermétique qui évite les infiltrations de tout fluide.
- Durcit rapidement sous l'action de la salive.
- Ne contient pas d'eugenol pour éviter les interférences avec la prise des résines et des composites.
- Excellente résistance à la pression masticatoire.
-

Indications d'utilisation

Obturation provisoire

Contre-indications

Aucune connue à ce jour

Mises en garde

Chez certains patients, Ciprospad peut causer des réactions allergiques. Dans ce cas, il ne doit plus être utilisé.

- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à l'eau immédiatement et abondamment. Consulter un médecin si nécessaire.
- En cas d'ingestion, consulter un médecin.
-

Précautions

Ne pas stocker au-dessus de 25°C

Réactions indésirables

Exceptionnellement, certaines personnes peuvent présenter une réaction au produit. Eviter l'emploi de Ciprospad chez ces personnes.

Interactions

Pas de cas reporté.

Instructions

Avec une spatule de bouche, prélever la quantité désirée de ciment et refermer soigneusement le pot.

Présentation

Boîte de 6 pots de 28g.

Numéro de lot et date de péremption

Le numéro de lot doit être mentionné dans toute correspondance qui requière l'identification du produit.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Pour usage dentaire seulement. Tenir hors de portée des enfants.

