

# CRESO-SPAD

## Désinfectant canalaire sans formol

### COMPOSITION

- Acétate de métacrésyl .....20%

### PROPRIETES

Désinfectant peu irritant pour les tissus péri-apicaux par rapport aux phénols et à l'eugénoïl ; il possède des propriétés sédatives. Volatile et de très basse tension superficielle, il va assurer une bonne pénétration dans les canaux radiculaires et les canalicules dentinaires.

### INDICATIONS

Désinfection après pulpectomie particulièrement lorsque l'apex est largement ouvert.  
Désinfection des canaux après pulpectomie.

### TECHNIQUE OPERATOIRE

Placer dans la chambre pulpaire une boulette de coton imprégnée de CRESO-SPAD fortement essorée.  
Pour le canal, réaliser la même procédure avec une pointe de papier absorbante.  
Protéger ce pansement avec un ciment d'obturation provisoire étanche (CIPROSPAD).

### DUREE DE STABILITE

36 mois

### CONSERVATION

CRESO-SPAD est à conserver à température ambiante dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. La date limite d'utilisation est indiquée sur le conditionnement.

### PRESENTATION

Flacon de 15 ml

PRODUIT RESERVE A UODONTO-STOMATOLOGIE

Fiche établie en juin 1998

**CE**  
0459

Année d'apposition : 1998