

**COMPOSITION**

Acides organiques
Oxyde de zinc
Verre de strontium
Méthacrylates

PROPRIETES

EasyCem est ciment pour couronne et bridge temporaire facile à utiliser.

Il montre une excellente adhésion aux matériaux des couronne et bridge temporaires, mais peut être facilement retiré des dents préparées.

EasyCem est un matériau à base d'oxyde de zinc et d'acides organiques constitué de deux composants qui se mélangent automatiquement dans une mini-seringue 1:1 de 5ml.

Grâce à sa formulation sans eugénol, il ne gêne pas la prise des matériaux d'obturation ou de scellement à base de résine.

INDICATIONS D'UTILISATION

Scellement temporaire des couronnes et bridges provisoires.

Scellement temporaire pour essai des restaurations permanentes.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des patients avec des antécédents de réactions allergiques aux acrylates ou à l'un des composants.

AVERTISSEMENTS

Chez certains patients, EasyCem peut causer des réactions allergiques ou des irritations de la peau. Dans ces cas, il ne doit plus être utilisé.

- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à l'eau immédiatement et abondamment. Consulter un médecin si nécessaire.
- En cas d'ingestion, ne pas chercher à faire vomir. Consulter un médecin.

PRECAUTIONS

Ne pas stocker au-dessus de 25°C.

REACTIONS INDESIRABLES

Chez certains patients, EasyCem peut causer des réactions allergiques ou des irritations de la peau. Dans ces cas, il ne doit plus être utilisé.

INTERACTIONS

Pas de cas reporté.

INSTRUCTIONS ETAPE PAR ETAPE

1. Préparation de la mini-seringue

Retirer le capuchon mobile de la mini-seringue et le jeter (ne pas le réutiliser !).

Il est remplacé par l'embout de mélange 1:1 spécifique, se fixant d'un mouvement rotatif latéral, qui le verrouille en position. La mini-seringue est prête à l'application.

Après utilisation, l'embout mélangeur utilisé doit être laissé en place jusqu'à la prochaine utilisation pour servir de bouchon.

2. Scellement

EasyCem est automatiquement mélangé lorsqu'il est délivré d'une légère pression régulière directement dans la couronne ou le bridge temporaire.

Déposer une fine couche à l'intérieur de la couronne ou du bridge temporaire et tenir en place pas plus de **1 minute 30** (temps de travail) avec précaution mais fermement sur les structures de la dent préparée.

Note : Ne pas déshydrater les moignons, les humidifier plutôt avec un peu d'eau. Un terrain humide facilite d'autant plus le retrait de la couronne ou du bridge temporaire par la suite.

EasyCem prend dans la bouche en **2-3 minutes**. Après la prise, retirer les excédents.

Note : L'extrusion initiale de l'embout de mélange (de la taille d'un petit pois environ) doit être jetée. Le mélange suivant sera ainsi parfait. Ceci doit être fait à chaque nouveau mélange.

3. Nettoyage

La mini-seringue ou l'embout utilisé, si laissé en place pour le stockage, exposés aux éclaboussures ou au jet de fluides organiques ou touchés par des mains contaminées ou par des tissus oraux doivent être désinfectés avec un désinfectant à usage hospitalier. Suivre attentivement le mode d'emploi du fabricant du désinfectant employé afin d'obtenir les meilleurs résultats.

PRESENTATION

2 mini-seringues de 5 ml et 10 embouts mélangeurs

NUMERO DE LOT ET DATE DE PEREMPTION

Le numéro de lot doit être mentionné dans toutes correspondances qui requièrent l'identification du produit.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Pour usage dentaire seulement. Garder hors de portée des enfants.

© Dentsply France 22/12/2004