

EUGENOL

COMPOSITION

- Eugénol pur 100

PROPRIETES

L'Eugénol possède des propriétés antiseptiques et calmantes et se combine grâce à sa fonction méthoxy à l'oxyde de zinc pour former un ciment eugénate.

PRECAUTIONS

- Contact avec la peau : laver à grande eau.
- Contact avec les yeux : laver soigneusement à grande eau (15 minutes au minimum) et consulter un ophtalmologiste.
- L'utilisation intra-canaire d'EUGENOL pur peut entraîner de vives irritations inflammatoires au contact des tissus péri-apicaux.

TECHNIQUE OPERATOIRE

Sur un bloc à mélanger (EUROBLOC) déposer la quantité de ciment canalaire ou d'oxyde de zinc et le nombre de gouttes d'eugénol nécessaires pour obtenir en fin de malaxage une pâte crémeuse ou épaisse.

DUREE DE STABILITE

24 mois. Conserver à l'abri de la chaleur et bien refermer le flacon après emploi.

CONSERVATION

EUGENOL est à conserver à température ambiante dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. La date limite d'utilisation est indiquée sur le conditionnement.

PRESENTATION

Flacon de 15 ml avec compte-gouttes. Pack de 6 flacons de 15 ml sans compte-gouttes.

PRODUIT RESERVE A L'ODONTO-STOMATOLOGIE

Fiche établie en Juillet 1998

C E

0459

Année d'apposition : 1998

g