

EUROGUM HP

Vinyl polysiloxane réticulant par réaction d'addition pour empreintes Hautes Performances.

COMPOSITION

Vinyl HDH polysiloxane
Hydrogéo-siloxane
Dioxyde de silicium amorphe
Pigments
Silice micronisée hydrophile

PROPRIETES

	EUROGUM HP 00 EUROGUM HP 0	EUROGUM HP 1 EUROGUM HP 2 EUROGUM HP 3 EUROGUM HP 4	EUROGUM HP 00 Rapide EUROGUM HP 3 Rapide'
Temps de malaxage	35 sec.	automatique	35 sec. Automatique'
Temps de travail	1 mn. 30 sec.	2 mn. 20 sec.	1 mn. 10 sec.
Temps de prise en bouche	4 mn	4 mn.	2 mn.

INDICATIONS

Double-mélange (en un temps)
EUROGUM HP 0 + EUROGUM HP 3

Wash-technique (en deux temps)
EUROGUM HP 0 puis EUROGUM HP 4

Empreinte monophasé et prothèse adjointe
EUROGUM HP 2

Empreinte en prothèse totale adjointe
EUROGUM HP 1 pour le joint périphérique
EUROGUM HP 2 pour l'empreinte fonctionnelle
EUROGUM HP 4 pour le rebasage

REMARQUE

Utiliser de préférence un porte-empreinte plein compressif et démontable du Dr. JOUVIN pour garantir une bonne rétention et compression du matériau, ou enduire un porte-empreinte du commerce avec un adhésif (ex. SILFI)Q qui doit être mis 3 mn. avant son utilisation. La vitesse de prise étant fonction de la température ambiante (EUROGUM durcit en 7 minutes à 23°C et en 4 minutes à température buccale), le matériau conservé au réfrigérateur aura un temps de travail et de prise allongés.

MODE D'EMPLOI EUROGUM HP 00, 00-R ou O Prélever une quantité égale de pâte A et B avec les cuillères de prélèvement, sans les interchanger, et mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'une teinte uniforme.

EUROGUM HP 1, 2, 3 ou 4

Retirer le bouchon de la double-seringue pour placer l'embout mélangeur de même couleur (avec ou sans embout intra-oral). Positionner la double-seringue sur l'injecteur (adapté à la cartouche de 25 ml ou 75 ml) Presser la gâchette de l'injecteur en s'assurant que les deux composants progressent ensemble dans l'embout mélangeur; Injecter le mélange homogène dans le porte-empreinte et (ou) directement sur les préparations. Positionner le porte-empreinte en bouche et le maintenir pendant 2 mn. 20 sec, minimum. Avant de le retirer, vérifier que le produit soit ferme, élastique et non collant. Rincer l'empreinte sous l'eau froide, puis la sécher avec un jet d'air sec.

CONSEIL D'UTILISATION

Laisser l'embout mélangeur sur la double-seringue après chaque prise d'empreinte. Les embouts mélangeurs violets destinés à EUROGUM HP 1 et 2 sont spécifiques des cartouches de 75 ml, ils sont adaptés aux consistances épaisses. Les embouts mélangeurs jaunes destinés à EUROGUM HP 3 et 4 sont spécifiques des cartouches de 25 ml, ils sont adaptés aux consistances fluides. Un embout Intra oral (code 605 78 122) peut être placé à leur extrémité pour injecter le matériau directement sur

les préparations.

CONSERVATION

Stocker dans un local sec et frais, en dessous de 25°C.

Fiche établie en juin 2000