

BATONNETS DE GUTTA PERCHA

Présentation : Boîte de 10 batonnets d'un poids total de 28,4 g.

Indications

- Obturation provisoire de cavités non exposées à la pression masticatoire et ne contenant pas de médicaments fluides. - Refoulement de la gencive et écartement temporaire des dents.

Mode d'emploi

- Ramollir le bâton en le passant au-dessus d'une flamme douce (pas directement dans la flamme). - L'appliquer dans la cavité au moyen d'un instrument froid. - La plasticité nécessaire au travail est atteinte à la température de 60° C. Résistance adéquate à la pression et à l'abrasion. - S'enlève facilement au moyen d'un instrument légèrement chauffé.