

HEMOSPAD

Solution astringente

COMPOSITION

- Sulfate ferrique 15,5 %

PROPRIETES

La solution de sulfate ferrique assèche instantanément les tissus gingivaux.

INDICATIONS

Permet d'obtenir un champ opératoire sec pendant la rétraction gingivale et avant prise d'empreinte. Efficace pour le contrôle de l'hémorragie après une pulpotomie.

PRECAUTION

Rincer abondamment à l'eau la zone traitée pour enlever tout résidu de produit.

TECHNIQUE OPERATOIRE

- **ASSÈCHEMENT AVANT PRISE D'EMPREINTE** à l'aide d'un fin pinceau, passer HEMOSPAD au fond du sulcus et au contact des tissus incisés pour permettre à la solution d'obturer chaque capillaire. Puis rincer.
- **ASSÈCHEMENT AVANT UNE RESTAURATION DE CLASSE II, III OU V** mettre en place un fil GINGIBRAID ON ou 1 N imbibé d'HEMOSPAD dans le sulcus.
- **RÉTRACTION GINGIVALE** choisir GINGIBRAID ON-1 N-2N en fonction de l'espace sulculaire. L'imprégner d'HEMOSPAD et mettre en place.
- **PULPOTOMIES** frotter le tissu vital sectionné à l'orifice des canaux radiculaires et rincer avant l'obturation lorsqu'il ne persiste plus de suintement. Déposer une goutte d'HEMOSPAD dans la chambre pulpaire. Dès que l'hémostase est obtenue, rincer et obturer.

DUREE DE STABILITE

36 mois

CONSERVATION

HEMOSPAD est à conserver à température ambiante dans son emballage d'origine, à l'abri de la

lumière et de l'humidité.

La date limite d'utilisation est indiquée sur le conditionnement.

PRESENTATION

Flacon de 15 ml

PRODUIT RESERVE A L'ODONTO-STOMATOLOGIE