

home Illuminé™

Gels de blanchiment dentaires pour traitement à domicile

Les gels de blanchiment dentaires Illuminé™ home peuvent s'utiliser seuls ou à la suite d'un traitement de blanchiment appliqué en cabinet dentaire.

Le principe actif des gels de blanchiment Illuminé home est le peroxyde de carbamide, qui s'est avéré le plus efficace dans le traitement à domicile de la dyschromie dentaire.

Le gel de blanchiment dentaire Illuminé home 10% contient 10% de peroxyde de carbamide, qui libère du H₂O₂ à une concentration de 3,6% environ.

Le gel de blanchiment dentaire Illuminé home à 15% contient 15% de peroxyde de carbamide, qui libère du H₂O₂ à une concentration de 5,4% environ et du fluorure de sodium.

COMPOSITION

Illuminé home 10%:

Peroxyde de carbamide (10%)
Glycérine
Carboxypolyméthylène
Hydroxyde de sodium
Eau
Arôme artificiel de menthe¹

Illuminé home 15%:

Peroxyde de carbamide (15%)
Glycérine
Carboxypolyméthylène
Hydroxyde de sodium
Eau
Arôme artificiel de menthe¹
Fluorure de sodium

Les deux gels de blanchiment dentaires Illuminé home ont un pH d'environ 6,0.

INDICATIONS

- Décoloration dentaire due à:
 - Des taches provenant d'aliments, de boissons et du tabac avec pénétration dans la substance dentaire
 - Des modifications dégénératives liées à l'âge
 - La prise de tétracycline (première et deuxième générations) ou de minocycline
 - Une fluorose, se manifestant surtout par une pigmentation marron
 - Une nécrose de la pulpe dentaire et/ou traitement endodontique.
- Masquage d'un émail tacheté.
- Des dents naturellement foncées (phénomène génétique).
- Blanchiment de dents décolorées avant des mesures de restauration et/ou prothétiques (ex: application d'une facette prothétique).

¹ Généralement reconnu sans danger (GRAS), US Food and Drug Administration.

Les meilleurs résultats s'obtiennent sur les patients dont les dents ont «viré» au jaune, à l'orange ou au marron clair.

CONTRE-INDICATIONS

1. Utilisation au cours de la grossesse ou de l'allaitement.
2. Allergie connue à un des constituants des produits.
3. Taches extrinsèques qui peuvent facilement être éliminées par un nettoyage dentaire professionnel et par une hygiène buccale minutieuse.
4. Utilisation chez des grands fumeurs, sauf s'ils s'abstiennent de fumer lors du port de la gouttière.

AVERTISSEMENTS

1. Illuminé home contient du peroxyde de carbamide, qui peut être irritant. Éviter tout contact avec les tissus buccaux, les yeux et la peau. En cas de contact accidentel, rincer abondamment la zone atteinte à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin.
2. S'assurer que la cause de la décoloration est connue pour éviter de masquer des états pathologiques.
3. Garder hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS

1. Les patients doivent toujours être avertis du risque de sensibilisation des dents et des tissus gingivaux durant le traitement.
2. Traiter toute carie présente et réparer les espaces en bordure de restauration, les espaces ou fissures dans l'émail et les zones dentinaires apparentes, avant le blanchiment, pour réduire la probabilité de transit du produit jusqu'à la pulpe dentaire, ce qui produirait une hypersensibilité ou une réaction inflammatoire.
3. Éviter toute exposition de l'agent de blanchiment sur des dents présentant une hypersensibilité connue et sur des dents à large cavité pulpaire.
4. S'assurer que les gouttières sont correctement ajustées pour réduire les risques d'ingestion de produit, réduire la quantité de produit requise et éviter tout contact gingival.
5. Durant l'insertion de la gouttière, veiller tout particulièrement à retirer soigneusement l'excédent de produit des muqueuses, ainsi que tout produit mal appliqué, et éviter tout contact avec la peau et les yeux.
6. En cas de gêne ou de sensibilité des dents ou des gencives ressentie par le patient durant le traitement avec Illuminé home, suivre les recommandations ci-dessous: Le patient doit prendre conseil auprès de son dentiste, qui lui indiquera la marche à suivre.

Dans le cas de dents sensibles, essayer d'utiliser moins de gel dentaire Illuminé home ou de raccourcir la durée de chaque exposition. Appliquer un gel à base de fluorure d'action locale, en suivant les instructions du fabricant.

Dans le cas d'une sensibilité gingivale, veiller à ce que la gouttière ne frotte pas contre le bord marginal de la gencive. Une recoupe de la gouttière peut être nécessaire.

INTERACTIONS AVEC LES MATÉRIAUX DENTAIRES

Il se peut que les restaurations de dents colorées existantes ne correspondent pas à la teinte plus claire des dents après le traitement. Les restaurations devront être remplacées.

Illuminé home doit être utilisé avant la mise en place de produits composites, facettes ou couronnes afin que la couleur des dents corresponde. Nous recommandons par ailleurs que le patient attende au moins deux semaines après le traitement pour permettre la stabilisation de la décoloration des dents avant d'effectuer des restaurations des dents antérieures.

Certaines restaurations anciennes (amalgames, par exemple) peuvent laisser des taches sombres dans la gouttière. Ce phénomène est normal et sans danger.

EFFETS INDÉSIRABLES

Il est possible que les patients ressentent une sensibilité liée à l'utilisation de produits à base de peroxyde de carbamide (surfaces exposées des racines, restaurations avec des infiltrations, dentine exposée, zones labio-linguales interproximales).

Une irritation de la muqueuse buccale peut se produire. Un mal de gorge ou des nausées ne sont pas à exclure en cas d'ingestion d'une quantité excessive de gel. Après insertion de la gouttière, retirer l'excédent de gel avec le doigt ou une brosse à dents.

Si la sensibilité des dents ou l'irritation de la muqueuse buccale persiste malgré toutes les précautions prises, le patient devra cesser d'utiliser le produit et consulter son dentiste. L'interruption du traitement doit être envisagée.

INSTRUCTIONS DETAILLEES POUR CABINET DENTAIRE

Consultation initiale

1. Rechercher les antécédents médicaux et dentaires du patient.
2. Procéder à un examen intra buccal des tissus mous, de l'état de santé des dents et du parodonte.
3. Informer le patient sur la période de traitement prévue, qui est généralement de une à deux semaines. Toutefois, selon la nature de la coloration, une période de traitement prolongée de six semaines à six mois pourra être nécessaire avant l'obtention de l'effet recherché.
4. Un prophylaxie complète (en utilisant la pâte prophylactique Nupro®) et un traitement au fluor sont recommandés avant de commencer le processus de blanchiment.
5. La procédure complète doit être envisagée avec le patient, en lui précisant les problèmes et les effets secondaires potentiels.
6. Fournir au patient la notice d'information du Patient Illuminé home.
7. Informer le patient que les restaurations de dents colorées existantes peuvent ne pas correspondre au ton plus clair des dents après le traitement et risquent de devoir être remplacées.
8. Utiliser un teintier adapté comme le teintier Vita² Lumin Vacuum, pour choisir une teinte de base. Noter dans le dossier du patient, les dents à traiter et les teintes actuelles et souhaitées.

Prise d'empreinte

Prendre une empreinte de l'arcade dentaire à traiter à l'alginat ou à l'élastomère. (Il est vivement recommandé de traiter les dents à raison d'une arcade à la fois, pour que le patient puisse observer les changements.)

INSTRUCTIONS DE FABRICATION DE LA GOUTTIERE ET COMMUNICATION AVEC LE PROTHESISTE DENTAIRE

Le kit de base Illuminé home comprend un livret d'instructions de fabrication des gouttières. Compléter la fiche d'instructions située à la dernière page du livret pour informer clairement le prothésiste dentaire des dents à traiter. Fournir le livret d'instructions de fabrication des gouttières et la fiche d'instructions remplie au prothésiste dentaire, avec votre commande.

² Vita est une marque déposée de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

INSTRUCTIONS DETAILLEES RESERVEES AU PATIENT

La notice d'utilisation destinée au patient comprend les instructions suivantes. Prière de conseiller le patient en conséquence:

Guide d'application du gel de blanchiment

1. Se brosser les dents et passer le fil dentaire avant de mettre la gouttière en place.
2. Avant la première utilisation d'une seringue Illuminé home, remplacer le capuchon par l'un des applicateurs fournis.
3. Ouvrir l'applicateur en cassant l'extrémité (à conserver pour fermer l'applicateur après avoir utilisé la seringue).
4. Suivant les instructions du dentiste, placer de petites quantités de gel sur la face avant de chaque dent à traiter. NE PAS trop remplir la gouttière.
Fermer l'applicateur sur la seringue et conserver la seringue pour le prochain traitement, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Chaque seringue contient environ 3 à 5 applications.
5. Insérer la gouttière remplie de gel dans la bouche, par-dessus les dents. Essuyer le surplus de produit des gencives ou des tissus avec le doigt ou une brosse à dents.
6. Porter la gouttière contenant le gel tout au long de la nuit ou selon l'indication du dentiste (suggestion: 2 heures minimum).
7. Ne pas manger, boire ou fumer durant le port de la gouttière.
8. Après le traitement, retirer la gouttière et se rincer les dents. Retirer le gel restant à la brosse à dents.
9. Nettoyer la gouttière à l'eau chaude en utilisant une brosse à dents. La faire sécher complètement et la ranger dans la boîte fournie.

CONSERVATION

Avant toute utilisation par le patient, réfrigérer les gels de blanchiment dentaires Illuminé home entre 2 et 8 °C pour maintenir la durée de conservation et garantir l'efficacité maximum du produit.

Toujours garder le kit Illuminé home à l'abri de la chaleur ou de la lumière solaire directe.

Des conditions de stockage inappropriées diminuent la durée de conservation et peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

NUMERO DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION

Le numéro de lot doit apparaître dans toute correspondance exigeant l'identification du produit.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:



Fabricant:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0) 75 31 5 83-0

Distributeur:
DENTSPLY France
Z.A. du Pas du Lac
4, rue M. Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 30 14 77 77

© DENTSPLY DeTrey 2004-07-27