

KALSOGEN PLUS

est un polymère renforcé à prise rapide de type oxyde de Zinc Eugenol. Ce Ciment, de teinte LY (jaune clair) correspond aux teintes Vita B2 et Biodent 15. KALSOGEN PLUS répond aux spécifications ISO 3107, type III pour les matériaux de restauration provisoire et de fond de cavité.

COMPOSITION

1 g poudre contient 0.99 g ciment à l'oxyde
1 g liquide contient 0.93 g eugéno

INDICATIONS

- Coiffages pulpaire indirects
- Scelllements canalaires
- Scelllements temporaire de pansements médicamenteux

CONTRE-INDICATIONS Coiffages pulpaire direct.

EFFETS SECONDAIRES

Aucun n'a été signalé

INCOMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX DENTAIRE

Ne peut être utilisé comme revêtement de fond de cavité sous les obturations acrylates. Ceci pouvant être la cause de ramollissement de la couche de surface du matériau composite.

DOSAGE ET MANIPULATION

DOSAGE

Proportions recommandées poudre/liquide 4.5 : 1t (en poids).

MÉLANGE

Déposer les quantités appropriées de poudre et de liquide sur une plaque de verre propre.

Incorporer progressivement des petites quantités de poudre dans le liquide en s'assurant d'un mélange homogène après chaque incorporation Ajouter la poudre pour l'obtention d'une consistance - mastic

TEMPS DE Mélange

1 mn 30 sec.

TEMPS DE TRAVAIL

2 mn depuis le début du mélange, humidité relative 50 % à température ambiante de 23 °C.

Le temps de travail et le temps de prise peuvent être augmentés ou diminués selon la température ambiante.

INSERTION

Placer le ciment dans la cavité parfaitement sèche et propre et tasser doucement. Durant la mise en place pour éviter que le ciment ne colle à l'instrument, tremper l'extrémité de l'instrument dans le surplus de poudre restant sur la plaque de verre.

FINITION

Durcissement -approximativement 3 mn après insertion en bouche. procéder ensuite à l'ébarbage et à la finition dans le cas d'un fond de cavité. enlever les excédents sur les bords de la cavité avant la mise en place du matériau d obturation.

REMARQUE

Ce produit es; réserve uniquement à l usage dentaire, Eviter tout contact avec les yeux dans le cas de contact. rincer abondamment à l'eau et éventuellement consulter un médecin.

STOCKAGE

Ranger les flacons après usage.
Conserver à l'abri de la lumière solaire

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ET DÉLAI D' UTILISATION

Ne pas utiliser après le délai d utilisation

Le numéro de référence indique l année, le mois et le jour de la fabrication

Ce numéro devra être indiqué dans toutes les correspondances ou contrôles du produit

Des différences peuvent apparaître dans les traductions des modes d emploi en raison des réglementations propres au pays