

Fix Adhesive – Liquid

Adhésif liquide pour empreintes à l'alginat

Fix Adhesive – Spray

Adhésif en aérosol pour empreintes à l'alginat

Fix Solvent

Produit nettoyant pour l'élimination des adhésifs Fix

Depuis plus de trente ans, les produits Fix sont utilisés avec succès comme accessoires pour la prise d'empreintes à l'alginat.

Fix Adhesive – Liquid et **Fix Adhesive – Spray** sont des adhésifs à base de solvant, qui augmentent l'adhérence entre les matériaux à empreintes à l'alginat et la surface du porte-empreinte.

Fix Solvent est un produit en aérosol, destiné à éliminer toutes traces d'adhésif du porte-empreinte après la prise et le moulage de l'empreinte.

Attention: Ce produit doit exclusivement être appliqué par un chirurgien dentiste ou sous sa surveillance.

COMPOSITION

Fix Adhesive – Liquid:

Polymère de diéthylènetriamine
Propan-2-ol
Xylène
Érythrosine

Fix Adhesive – Spray:

Polymère de diéthylènetriamine
Propan-2-ol
Xylène
Érythrosine
Gaz propulseur: Butane

Fix Solvent:

Propan-2-ol
Xylène
Gaz propulseur: Butane

INDICATIONS

Fix Adhesive – Liquid et Fix Adhesive – Spray sont des adhésifs pour empreintes à l'alginat.

Fix Solvent est utilisé pour éliminer les adhésifs Fix résiduels du porte-empreinte après la prise et le moulage de l'empreinte.

CONTRE-INDICATIONS

Allergie connue à la diéthylènetriamine ou à tout autre composant des produits.

AVERTISSEMENTS

Fix Adhesive – Liquid:

Le produit est:

- hautement inflammable
- nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau
- irritant pour les yeux, les muqueuses et la peau.

Les vapeurs peuvent provoquer une somnolence et des sensations de vertige.

Des cas isolés de réactions allergiques et de lésions inflammatoires réversibles des muqueuses buccale et nasale ont été décrits après exposition au produit.

La diéthylènetriamine peut provoquer une sensibilisation et des réactions allergiques chez les personnes prédisposées.

Fix Adhesive – Spray:

Le produit est:

- extrêmement inflammable
- nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau
- irritant pour les yeux, les muqueuses et la peau.

Les vapeurs peuvent provoquer une somnolence et des sensations de vertige.

Des cas isolés de réactions allergiques et de lésions inflammatoires réversibles des muqueuses buccale et

nasale ont été décrits après exposition au produit.

La diéthylènetriamine peut provoquer une sensibilisation et des réactions allergiques chez les personnes prédisposées.

Fix Solvent:

Le produit est:

- extrêmement inflammable
- nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau
- irritant pour les yeux, les muqueuses et la peau.

Les vapeurs peuvent provoquer une somnolence et des sensations de vertige.

Des cas isolés de réactions allergiques et de lésions inflammatoires réversibles des muqueuses buccale et nasale ont été décrits après exposition au produit.

PRÉCAUTIONS

Utiliser dans une pièce bien aérée.

Tenir à distance de toute source d'ignition. Ne pas fumer.

Éviter le contact avec la peau, les muqueuses et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

Éviter l'inhalation des vapeurs et d'aérosol.

Maintenir le récipient fermé hermétiquement.

INTERACTIONS AVEC LES MATÉRIAUX DENTAIRES

Fix Adhesive – Liquid et Fix Adhesive – Spray forment un lien adhésif entre le matériau à empreintes à l'alginate frais et la surface du porte-empreinte.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Application de l'adhésif Fix

1. Sélectionner le porte-empreinte approprié.
2. Avant de mélanger le matériau à empreintes à l'alginate, appliquer une fine couche de Fix Adhesive – Liquid ou Fix Adhesive – Spray sur la surface intérieure du porte-empreinte. Ne pas déborder du porte-empreinte sur les surfaces qui ne seront pas couvertes par le matériau à empreintes.
3. Laisser sécher la couche de Fix Adhesive pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'elle commence à prendre.
4. Charger le matériau à empreintes (par exemple Blueprint® cremix) dans le porte-empreinte de la manière habituelle.

Nettoyage du porte-empreinte avec Fix Solvent

Pour faciliter la séparation du porte-empreinte et du moulage, réchauffer le porte-empreinte au-dessus d'une flamme.

1. Pour éliminer toute trace d'adhésif résiduel, vaporiser Fix Solvent sur la surface intérieure du porte-empreinte. Laisser agir le produit pendant quelques secondes pour dissoudre les traces d'adhésif résiduel.
2. Essuyer soigneusement le solvant résiduel avec un papier absorbant.

CONSERVATION

Maintenir le récipient fermé hermétiquement.

Tenir à l'abri d'une exposition solaire directe. Ne pas conserver à des températures supérieures à 50 °C.

Ne pas percer ou brûler le récipient, même après utilisation.

NUMÉRO DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION

Le numéro de lot doit apparaître dans toute correspondance exigeant l'identification du produit.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

Fabricant:

DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1

78467 Konstanz

ALLEMAGNE

Tél. +49 (0) 75 31 5 83-0

Distributeur:

DENTSPLY France

Z.A. du Pas du Lac

17, rue M. Faraday

78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél. 01 30 14 77 77