

NUPRO®

PÂTE PROPHYLACTIQUE

Avec fluor ou sans fluor

ATTENTION : la vente de ce produit est réservée aux professionnels de la dentisterie. Pour usage dentaire seulement.

Ces instructions et fiches toxicologiques couvrent toutes les pâtes prophylactiques NUPRO quel qu'en soit le format et la texture.

NUPRO est une pâte prophylactique de grande qualité, disponible avec fluor ou sans fluor, qui élimine en douceur le tartre dentaire et les taches.

La pâte prophylactique NUPRO est disponible dans les textures suivantes :

- F - Fine (Doré)**
Idéal pour les jeunes patients et les procédures de prophylaxie qui requièrent une faible abrasion des dents.
- M - Moyenne (Bleu)**
Convient à la plupart des procédures de nettoyage nécessitant un haut niveau de polissage.
- C - Grosse (Rouge)**
Pour les patients présentant une quantité importante de taches causées par la cigarette ou l'abus de boissons génératrices de taches.
- P - Plus (Vert)**
Un nettoyant surpuissant pour un grand nombre de taches difficiles à éliminer avec les pâtes prophylactiques conventionnelles.

MODE D'EMPLOI

A utiliser lors des procédures de nettoyage et de polissage dans le cadre d'un traitement prophylactique professionnel. Avant l'obturation des cavités et des fissures, la pâte prophylactique NUPRO sans fluor doit être utilisée.

COMPOSITION

La pâte prophylactique NUPRO contient de la ponce, de la glycérine, de la diatomite (texture fine seulement), de la saccharine de sodium, de l'eau, du silicate de sodium, un parfum, un colorant, des épaississants et des agents conservateurs. Sa formule unique d'agents nettoyants et polissants a été conçue pour les applications professionnelles lors des procédures d'hygiène dentaire conventionnelles.

La pâte prophylactique fluorée NUPRO contient du fluorure de sodium à une concentration de 1,23-% d'ion fluor.

La pâte Nupro Prophy contient les colorants suivants :

- F - Fine (or)**
FD&C Jaune No. 6
- M - Moyenne (bleue)**
FD&C Bleu No. 1 et FD&C Bleu No. 2
- C - Grossière (rouge)**
FD&C Rouge No. 40
- P - Supérieure (verte)**
FD&C Jaune No. 10 et FD&C Vert No. 5

CONTRE-INDICATIONS

La pâte prophylactique NUPRO avec ou sans fluor est contre-indiquée chez les patients souffrant d'une allergie connue à l'un quelconque de ses composants.

FRANÇAIS

DENTSPLY
PROFESSIONAL

AVERTISSEMENTS

- Une ingestion excessive de fluor peut provoquer des nausées. Les pâtes contenant du fluor doivent donc être expectorées et ne pas être avalées.
- La pâte prophylactique NUPRO peut entraîner une irritation des yeux en cas de contact. Dans pareil cas, rincer immédiatement les yeux en abondance avec de l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation ou l'inconfort persiste.
- Éviter tout contact répété de la peau avec la pâte prophylactique NUPRO, car l'exposition chronique répétée peut entraîner une dermatite. En cas de contact accidentel avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon.
- L'ingestion de la pâte prophylactique NUPRO peut entraîner la salivation, des nausées et des vomissements. L'ingestion de grandes quantités peut déclencher des douleurs abdominales, des faiblesses, des tremblements, des spasmes ou des convulsions. Un décès peut survenir à l'issue d'une paralysie respiratoire. En cas d'ingestion accidentelle d'une dose importante, appeler immédiatement un médecin et administrer de grandes quantités de lait ou à défaut d'eau.

PRECAUTIONS

- Les pâtes prophylactiques fluorées ne peuvent remplacer aucune autre forme de traitement au fluor.
- Les pâtes prophylactiques NUPRO ne doivent être utilisées que par des personnes professionnellement formées à exercer une prophylaxie dentaire.
- Lors de l'utilisation de ce produit, porter des lunettes et des gants de protection.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Pour éviter toute contamination, prélever suffisamment de pâte pour une seule procédure et placer-la dans un godet Dappen propre ou dans tout autre récipient approprié.

Les capsules individuelles contiennent suffisamment de pâte prophylactique NUPRO pour une procédure de prophylaxie.

Au moyen d'un angle jetable à prophylaxie tel que l'angle jetable à prophylaxie NUPRO revolTM ou d'un angle à prophylaxie traditionnel en métal, remplir la cupule en enfonceant la face de la cupule dans la pâte tout en faisant fonctionner l'angle à faible vitesse.

Tout au long de la procédure, veiller à conserver suffisamment de pâte sur la cupule pour réduire au minimum la chaleur frictionnelle. L'évacuation de la salive est recommandée afin d'éviter que la pâte ne soit trop diluée ou avalée.

CONSERVATION

Refermer immédiatement le couvercle après utilisation pour éviter une déshydratation.

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.



DATE DE PÉREMPTION ET

NUMÉRO DE LOT

Le numéro de commande, le numéro de lot et la date de péremption doivent figurer sur toute correspondance nécessitant l'identification du produit. Ne pas utiliser après la date de péremption.