

Cavitron® La Poudre Prophylactique

Instrucciones de uso

Uniquement sur ordonnance.

FRANCAIS

DESCRIZIONE: La poudre prophylactique Prophy-Jet® est une poudre de bicarbonate de sodium parfumée. La poudre prophylactique JET-Fresh® est une poudre de trihydroxyde d'aluminium parfumée. Ces deux poudres prophylactiques servent aux procédures prophylactiques professionnelles de polissage à l'air.

POUR USAGE EXTERNE.

INDICAZIONI ED USO: da usarsi in associazione ad un sistema di lucidatura a getto d'aria, per la rimozione di un'ampia gamma di macchie estrinseche, ad es. fumo, caffè e té, cloressidina. Profilassi dei pazienti ortodontici. Preparazione delle superfici dentali prima delle procedure di adesione e sigillatura. Prodotto raccomandato per pazienti sottoposti a dieta senza sodio.

CONTROINDICAZIONI: I pazienti affetti da gravi patologie respiratorie devono consultare il proprio medico curante prima di sottoporsi alle procedure profilattiche di lucidatura ad aria.

AVVERTENZE: Non dirigere il getto dell'aria contro il tessuto molle o nel solco. Sono stati riportati casi di enfisema tissutale dovuti all'indirizzamento del getto di aria/acqua/polvere contro il tessuto molle o nel solco. Non alterare la composizione della polvere con additivi in quanto possono ostruire il sistema di lucidatura ad aria.

PRECAUZIONI: Evitare il contatto diretto della polvere profilattica con superfici e aree marginali di ricostruzioni dentali.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Agitare bene prima dell'uso. Attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo di lucidatura.

CONTIENE:

La poudre prophylactique **Prophy-Jet** contient du bicarbonate de sodium, un parfum et du saccharinate de sodium.

La poudre prophylactique **JET-Fresh** Prophy contient du trihydroxyde d'aluminium et un parfum.

CONFEZIONE: da 364 g

CONSERVAZIONE: Non conservare o esporre a temperature superiori a 35°C.

CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.