

Silfix

Adhésif pour silicones par addition

Silfix est un adhésif à base de polysiloxane qui augmente l'adhérence entre le matériau d'empreinte à base de silicone par addition et la surface du porte-empreinte.

Attention: Ce produit doit exclusivement être appliqué par un chirurgien-dentiste ou sous sa surveillance.

COMPOSITION

Méthylpolysiloxane

Toluène

Pigment (Solvant Vert 3, Index Couleur N° 61565)

INDICATIONS

Silfix est appliqué sur la surface intérieure du porte-empreinte avant de le remplir avec le matériau d'empreinte mélangé afin d'augmenter l'adhérence au porte-empreinte du matériau d'empreinte à base de silicone par addition conventionnels, quadrifonctionnels et hydrophiles (synonymes: silicones A, siloxanes).

CONTRE-INDICATIONS

Utilisation avec des patients ou personnes ayant une allergie connue à un des composants du produit.

Utilisation avec un matériau d'empreinte non listé dans la section „Indications“.

AVERTISSEMENTS

Le produit est:

- Hautement inflammable
- Nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau
- Irritant pour les yeux, les muqueuses et la peau.

Les vapeurs peuvent provoquer une somnolence et des sensations de vertige.

PRÉCAUTIONS

Utiliser dans une pièce bien aérée.

Tenir à distance de toute source d'ignition. Ne pas fumer.

Prendre des mesures de prévention contre l'électricité statique.

Éviter le contact avec la peau, les muqueuses et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

Éviter l'inhalation des vapeurs.

Maintenir le récipient fermé hermétiquement.

INTERACTIONS AVEC LES MATÉRIEAUX DENTAIRES

Adhère aux matériaux d'empreinte à base de silicone par addition non pris (silicones A, siloxanes).

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Application de Silfix

1. Sélectionner le porte-empreinte approprié.
2. Avant de mélanger le matériau d'empreinte à base de silicone par addition, appliquer une fine couche de Silfix sur la surface intérieure du porte-empreinte. Ne pas déborder du porte-empreinte sur les surfaces qui ne seront pas couvertes par le matériau d'empreinte.
3. Laisser sécher la couche de Silfix pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit collante.
4. Charger le matériau d'empreinte à base de silicone par addition (par exemple Aquasil) dans le porte-empreinte de la manière habituelle.

Nettoyage du porte-empreinte

1. Pour éliminer toute trace d'adhésif résiduel sur le porte-empreinte, appliquer un solvant spécifique à cet usage (par exemple Fix Solvent) sur la surface intérieure du porte-empreinte. Laisser agir le produit pendant quelques secondes pour dissoudre les traces d'adhésif résiduel.
2. Essuyer soigneusement le solvant résiduel avec un papier absorbant.

CONSERVATION

Maintenir le récipient fermé hermétiquement.

Tenir à distance de toute source d'ignition. Ne pas fumer.

Conserver à une température comprise entre 10 °C et 24 °C.

Des conditions de conservation inadéquates raccourciront la durée de vie du produit et pourraient provoquer son dysfonctionnement.

NUMERO DE LOT ET DATE D'EXPIRATION

Le numéro de lot devra être mentionné dans toute correspondance nécessitant l'identification du produit.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:



Fabricant:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0) 75 31 5 83-0

Distributeur:
DENTSPLY France
Z.A. du Pas du Lac
4, rue M. Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 30 14 77 77

© DENTSPLY DeTrey 2003-10-06