

# NETISPAD

Liquide nettoyant pour dissoudre et éliminer les traces de ciments, eugénates, pâtes à empreinte.

## COMPOSITION

p. Mentha - 1 ,8 diene  
Essence aromatique

## PROPRIETES

Puissant solvant insoluble dans l'eau. Peut-être mélangé avec de l'alcool. Solvant de nombreuses résines. Produit irritant pour la peau et les muqueuses.

## CARACTÉRISTIQUES

Forte odeur d'agrumes.  
Point d'ébullition environ 170°C  
Densité : 0,84.

## MODE D'EMPLOI

NETISPAD peut être utilisé soit en liquide d'immersion, soit sur un coton imbibé. Essuyer avec un papier absorbant. Rincer éventuellement à l'alcool pour éliminer les traces de NETISPAD.

## MISE EN GARDE

Porter des gants.

## CONSERVATION

NETISPAD est à conserver à température ambiante dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. La date limite d'utilisation est indiquée sur le conditionnement.

## PRESENTATION

Solution - Pack de 3 flacons de 180 ml.

## PRODUIT RESERVE A L'ODONTO-STOMATOLOGIE

Fiche établie en Juin 1998

# CE

Année d'apposition : 1998