



“ Conseil

Infiltration intra-ligamentaire

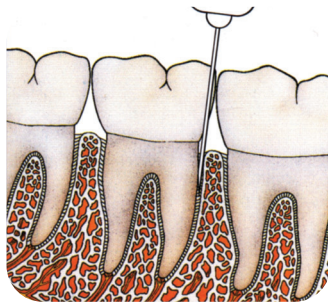

- L'aiguille est introduite doucement le long de la dent sur 3 mm environ
- Le biseau de l'aiguille est orienté vers la dent
- Infiltrer lentement quelques gouttes d'anesthésie

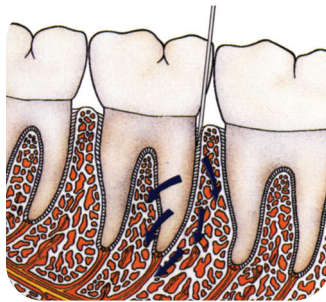

- Procéder à une rotation de 180° de la seringue
- Terminer l'infiltration en direction de l'os alvéolaire

Nos seringues sont stérilisables suivant le protocole de la circulaire DGS/DH n°100 du 11/12/95 relative à la maladie de Creutzfeldt-Jakob (18 min à 134°C en autoclave à vapeur d'eau)

”