



POGO™

One Step Diamond Micro-Polisher

Polishing System
Sistema de Pulido
Instruments à polir
Polier-System
Sistema per lucidatura

Sistema de Polimento
Polishing System
Polijsysteem
Polishing System

DENTSPLY
CAULK

CE
0120

***Directions
For Use***

Mode d'emploi — Français

Les instruments à polir PoGo™ (disque, cupule, pointe) sont des dispositifs pré-montés, diamantés et jetables en résine diméthacrylate uréthane conçus pour le polissage final de toute restauration en résine composite. En respectant les instructions, les instruments PoGo™ permettront d'obtenir un poli parfait des composites hybrides tels que: Esthet•X®, Spectrum® TPH®, Prisma® TPH®, le Prisma® AP.H®, SureFil™ ainsi que des composites microfinés. Les instruments à polir PoGo™ sont également efficaces pour le polissage final des compomères et les composites fluides et des compomères de restauration tels que Esthet•X® Flow, Dyract® AP et Dyract® flow.

Avertissement: Usage réservé aux dentistes.

INDICATIONS

Les disques, cupules et pointes à polir PoGo™ sont indiqués pour le polissage final des restaurations en résine composite ou compomère, après modelage et finition convenables.

COMPOSITION

Résine diméthacrylate uréthane polymérisée

Poudre de diamant très fine

Dioxyde de silicium

Mandrin solidaire en plastique

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas réutiliser les instruments à polir PoGo™ qui sont des instruments jetables à usage unique. Essayer de stériliser, de désinfecter et/ou de réutiliser ces instruments peut nuire à leurs performances.
- LES INSTRUMENTS A POLIR PoGo™ NE DOIVENT PAS ETRE EMPLOYES AVEC DES PIECES A MAIN A GRANDE VITESSE.

ATTENTION

- Les instruments à polir PoGo™ sont conçus pour être utilisé sans eau. Comme pour tous les instruments rotatifs, un contact prolongé entraînera un dégagement de chaleur. Une utilisation par pression intermittente est recommandée. L'utilisation d'une seringue à air durant le polissage présente l'avantage de chasser les matières résiduelles.
- Exercer une pression latérale excessive sur les instruments de polissage PoGo™ peut séparer l'instrument du mandrin ou provoquer une usure rapide qui diminuera son efficacité. Ce type de pression excessive peut provoquer une déformation de la surface de la restauration.
- Pour éviter de blesser le patient, il est important de garder le contrôle de l'instrument rotatif. Les tissus mous tels que les gencives ou les muqueuses peuvent être blessées en cas de contact accidentel. Si cela se produit, laver soigneusement la partie atteinte avec de l'eau et donner ou faire donner les soins médicaux nécessaires.

PRECAUTIONS

- Ce produit est prévu pour une utilisation selon les spécifications énoncées dans le Mode d'emploi. Toute utilisation contraire aux spécifications du Mode d'emploi sera de la seule responsabilité du praticien.
- Une utilisation dans une pièce bien aérée est recommandée. Eviter d'inhaler les particules issues du polissage.
- Protéger les restaurations adjacentes contre tout contact involontaire.

- **Conservation et péremption:** Il est recommandé de conserver les instruments à polir PoGo™ dans un endroit sec. Conserver les instruments à polir PoGo™ à une température comprise entre 18°C et 25°C, et sous une humidité relative de 50%, + 20%. Eviter l'exposition directe aux rayons du soleil. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

EFFETS INDESIRABLES

De l'eczéma de contact ou d'autres réactions allergiques peuvent survenir chez des personnes à risque.

MODE D'EMPLOI ETAPE PAR ETAPE

Etape 1: Réaliser la restauration ou la facette en composite selon les techniques standards. Effectuer le gros de la finition et terminer les contours de la restauration avec une fraise à finir, une fraise à finir diamantée ou le système de finition Enhance™.

Conseil technique: Avant l'utilisation des instruments à polir PoGo™ (disque, cupule ou pointe), il faut finir la restauration et lui donner ses contours et ses caractéristiques anatomiques définitives. La surface doit être lisse et sans défaut.

Etape 2: Pour obtenir d'excellents résultats sur des restaurations importantes, l'utilisation, au moyen d'un contre angle, d'instruments à finir intermédiaires tels que Enhance™ Finisher (disque, cupule et pointe) permettra d'ôter les bavures et de rendre la surface lisse, mate et sans défaut. Note: LES INSTRUMENTS ENHANCE™ NE DOIVENT PAS ETRE EMPLOYES AVEC DES PIECES A MAIN A GRANDE VITESSE. Pour des restaurations plus petites, une surface aux contours convenables et au fini acceptable peut être obtenue avec des instruments de finition appropriés. Si tel est le cas, passer à l'étape 3.

Etape 3: Insérer un instrument de polissage PoGo™ dans un contre angle à vitesse normale. LES INSTRUMENTS DE POLISSAGE PoGo™ NE DOIVENT PAS ETRE EMPLOYES AVEC DES PIECES A MAIN A GRANDE VITESSE. Commencer à polir la surface de la restauration en exerçant une pression légère avec une vitesse modérée. Lorsque le disque est utilisé, la partie large et plate du disque doit être mise en contact avec la restauration, afin d'augmenter l'efficacité du polissage. Pour améliorer le brillant, diminuer la pression en exerçant de petits mouvements de ponçage.

CONSEIL TECHNIQUE:

- Les disques de polissage PoGo™ sont particulièrement adaptés aux surfaces vestibulaires et aux angles libres.
- Les pointes de polissage PoGo™ sont particulièrement adaptées aux surfaces occusales postérieures et aux surfaces linguales concaves.
- Les cupules de polissage PoGo™ sont destinées aux zones cervicales et proximales inclinées.

ENTRETIEN ET STERILISATION

Ne pas stériliser ni réutiliser les instruments de polissage PoGo™. Les jeter après utilisation.

NUMERO DE LOT ET DATE DE PEREMPTION

- Ne pas utiliser après la date de péremption, identifiée conformément à l'ISO: «AAAA/MM»
- Les références suivantes doivent être indiquées dans toute correspondance:
 - Référence du produit
 - Numéro de lot
 - Date de péremption figurant sur l'emballage