

PULPIDOR

Protection dentinaire et pulpaire

COMPOSITION

- Gomme laque en paillette	1,00 g
- Baume du Pérou	4,00 g
- Colophane	20,00 g
- Alcool à 95°	75,00 g

PROPRIETES

PULPIDOR obture tous les petits canaux de la dentine en empêchant la pénétration bactérienne ; il protège la pulpe contre les irritations d'origine chimique, thermique et mécanique.

Il faut donc obturer ces canalicules au moyen d'un produit absolument neutre vis-à-vis du plasma cellulaire et qui doit adhérer aussi bien à la dentine qu'aux tissus mous des fibres de TOMES après avoir pénétré dans les canalicules les plus ténues.

Ce produit doit être insoluble à la salive et imperméable aux produits chimiques solubles à l'eau. Il doit résister à l'usure mécanique.

Toutes ces exigences sont parfaitement satisfaites par la préparation résineuse de colophane soluble à l'alcool, mais insoluble à l'eau; étanche et neutre, elle résiste aux bases et aux acides.

Enfin, PULPIDOR contrarie très fortement la prolifération de la flore bactérienne de la dentine cariée.

INDICATIONS

Protection contre les irritations chimiques et thermiques des cavités par obturation des canalicules de TOMES avant la mise en place d'une restauration ou d'une reconstitution (amalgame, composite, ciment...).

Protection des préparations pré-prothétiques sur dents pulpées.
Protection des collets sensibles.

PULPIDOR protège les tubuli dentinaires après application de DESIBIL dans le traitement de l'hyperémie pulpaire et de l'hyperesthésie dentinaire.

PRECAUTIONS

Tenir le flacon de PULPIDOR soigneusement fermé. Si le produit s'épaissit, il peut être dilué à l'alcool à 95°. Les instruments recouverts de PULPIDOR seront facilement nettoyés à l'alcool.

TECHNIQUE OPERATOIRE

Appliquer PULPIDOR à l'aide d'un tampon de coton sur la dentine préalablement séchée avec du coton ou au jet d'air appliqué avec modération.

Dans le cas d'obturations devant être effectuées sur des dents venant d'être traitées au PULPIDOR, enlever à l'aide d'un coton légèrement humecté d'alcool l'excédent de produit n'ayant pu pénétrer dans la dentine avant de procéder aux obturations.

Le froid provoqué par l'évaporation peut occasionner une réaction passagère au moment de l'application ; pour ne pas la renforcer, laisser sécher sans utiliser le jet d'air.

Des applications répétées à intervalles, réguliers pourront prolonger d'autant la résistance de la dent à la sensibilité. PULPIDOR isole la dentine et n'a aucune action directe sur la pulpe ; celle-ci peut avoir été lésée par l'action mécanique du fraisage, une action chimique ou thermique quelconque.

DUREE DE STABILITE

36 mois

CONSERVATION

PULPIDOR est à conserver à température ambiante dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

La date limite d'utilisation est indiquée sur le conditionnement.

PRESENTATION

Flacon de 15 ml

PRODUIT RESERVE A L'ODONTO-STOMATOLOGIE