

PULPISPAD

Traitement et obturation canalaire

COMPOSITION

POUDRE:

- Poudre d'argent	1,009
- Diiodothymol	22,45 g
- Oxyde de zinc	76,559

LIQUIDE

- Menthol	4,75 g
- Parachlorophénol	5,70 g
- Camphre synthétique	13,35 g
- Eugénol	76,20 g

PROPRIETES

PULPISPAD est une pâte antiseptique non formolée, sans anti-inflammatoire, aux propriétés analgésiques locales atoxiques, destinée à l'obturation canalaire des dents quelle que soit leur pathologie.

L'activité antiseptique du mélange eutectique Parachlorophénol Camphre est complétée par celle du Diiodothymol. Le Camphre inhibe le pouvoir coagulant du Parachlorophénol et permet une pénétration progressive des canalicules. Les antiseptiques retardant la prise en masse de la pâte, ils prolongent le processus de désinfection et permettent la réalisation d'obturations multiples.

L'adhérence à la gutta percha et la rétraction infime de la pâte PULPISPAD lors de sa polymérisation assure la pérennité de l'obturation radiculaire.

Le diiodothymol, par son mouillant, favorise une bonne adhérence aux parois canalaire et confère la fluidité nécessaire à la pénétration canalaire.

Le menthol, doté de propriétés analgésiques, présente également une action antiseptique. L'oxyde de zinc, combiné à l'eugénol, assure la prise en masse de la pâte.

La poudre d'argent renforce la radio-opacité de la pâte d'obturation.

INDICATIONS

- Traitement et obturation en une seule séance des dents infectées ou non, présentant ou non une atteinte chronique du péri-apex ou une fistulisation.
- Traitement et obturation en deux séances en période inflammatoire aiguë.

CONTRE-INDICATION

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Sur un bloc de spatulation, déposer une dosette arasée de poudre PULPISPAD et prélever une goutte de liquide PULPISPAD. Mélanger progressivement par petite quantité jusqu'à l'obtention d'une pâte aussi épaisse que possible pour monter au bourre-pâte

1. Traitement en une seule séance

- après bio-pulpectomies,
- en cas de pathologie péri-apicale chronique ou en cas de fistulisation, après un alésage soigneux, il sera procédé au remplissage canalaire dans la même séance.

2. Traitement en deux séances

- en période d'inflammation aiguë, la chambre pulpaire est ouverte, les canaux sont désinfectés par instillation et alésage dans une solution antiseptique douce (Parachlorophénol-Camphre).
- un pansement de ces mêmes antiseptiques est laissé in situ sous obturation temporaire occlusive pendant une semaine.
- au cours de la deuxième séance, après alésage complet et rigoureux, le remplissage canalaire est effectué avec la pâte PULPISPAD dont la consistance sera la plus épaisse possible.

DURÉE DE STABILITÉ

36 mois.

PRÉSENTATION

Coffret contenant :
- 1 pot de poudre de 20 g
- 1 flacon de liquide de 15 ml

Médicament Autorisé n° 324 842.7

PRODUIT RÉSERVE A L'ODONTO-STOMATOLOGIE