

**Précautions d'emploi :**

Stocker les capsules dans un endroit sec et ventilé ( $\leq 25^{\circ}\text{C}$ )

Travailler dans des locaux ventilés avec des revêtements non textiles décontaminables.

Toujours réaliser sous refroidissement, aspiration et champ opératoire, le fraisage et le polissage de l'amalgame.

Condenser l'amalgame par des moyens classiques (fouloir) et ne pas utiliser de condenseur à ultrasons.

Ne pas placer d'amalgame dentaire au voisinage d'autres restaurations métalliques afin d'éviter tout risque de corrosion.

Eviter par prudence la pose et la dépose d'amalgame pendant la grossesse et l'allaitement.

En cas de survenue de réactions locales, notamment de lésions lichénoïdes au voisinage d'un amalgame, il est justifié de déposer l'obturation.

A usage dentaire uniquement.

# Spadalloy

Alliage ternaire à  
composition unique  
non Gamma 2



**Dentsply France**

4, rue Michael Faraday  
78180 Montigny-Le-Bretonneux  
Tél : 01 30 14 77 77

Spadalloy est un alliage ternaire non sphérique, non gamma 2 à composition unique sans zinc et à haute teneur en cuivre.

**Composition :**

Argent	46%
Etain	31%
Cuivre	23%

**Teneur de la capsule :**

Dose n°1 : 400 mg (poussoir incolore)

Dose n°2 : 600 mg (poussoir gris)

**Indications :** restaurations soumises à contraintes (classes I et II) lorsque l'utilisation d'autres matériaux ou techniques de restauration n'est pas indiquée.

**Contre-indications :** Chez les patients ayant une allergie connue à l'amalgame.

**Mode d'emploi :**

1. Activer la capsule en enfonçant le poussoir verticalement vers le haut.
2. Fixer la capsule sur l'amalgamateur.
3. Triturer le temps correspondant (temps indicatifs en secondes) :

	Dose n°1	Dose n°2
Silamat S5	6 - 8	6 - 9
Capmix	9 - 12	6 - 8
Linea Tac	9 - 12	9 - 12

4. Ouvrir la capsule et prélever l'amalgame.
5. Refermer la capsule et la stocker en prévision de retraitement.
6. Effectuer la restauration immédiatement (temps de travail 3 mn 30 – temps de prise total 7 mn)