

# VERIFIX

## Alesage chimique des canaux


### FORMULE

Borate de phénylmercure . . . . . 0,01 g  
Acide citrique . . . . . 10,00 g  
Essence de menthe Mitcham . . . 0,02 g  
Eau purifiée . . . . . 89,979

A.M.M. 500 040.1


### PROPRIETES

L'acide citrique

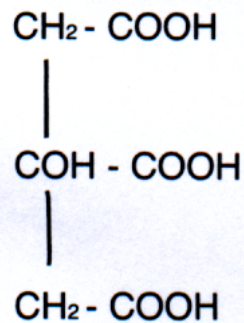

est un chélatant qui possède une affinité particulière pour le calcium.

Le borate de phénylmercure

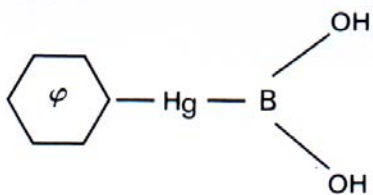

antiseptique non irritant assure, associé avec l'acide citrique, un puissant effet bactéricide.

VERIFIX ramollit aussi bien les résidus de la pulpe dévitalisée que la dentine des parois, ce qui facilite à tous points de vue le nettoyage mécanique du canal.

### INDICATIONS

- Mise en évidence des orifices canaux
- Permet un nettoyage optimal des canaux
- Alésage chimique des canaux
- Facilite l'alésage mécanique des canaux
- Nettoyage des dépôts calcaires sur les instruments délicats ou sur les prothèses.

#### **INDICATIONS EN PARODONTOLOGIE**

- Mordancage du cément avant réattachement épithélial.

#### **CONTRE-INDICATIONS**

- VERIFIX est sans action sur les résines ' phénoplastes, seul un ramollissement de la dentine périphérique peut être envisagé.

#### **MODE D'EMPLOI**

Introduire VERIFIX dans la cavité pulpaire à l'aide d'une pipette, puis faire pénétrer dans le canal radiculaire à l'aide d'un fouloir à canaux. Elargir ensuite le canal mécaniquement, en commençant comme d'habitude par la lime à canaux la plus fine. Répéter, cas échéant, plusieurs fois le traitement au VERIFIX. L'application d'une préparation neutralisante après traitement du canal au VERIFIX ne s'impose pas. Rincer à l'eau.

Dans les cas de calcifications très denses, l'action de VERIFIX peut être prolongée en laissant VERIFIX agir sous pansement (Ciprospad) pendant quelques jours - 7 jours maximum.

#### **PRESENTATION**

- Flacon de 30 ml.

Produit réservé à l'art dentaire