

**MODE D'EMPLOI**

# Pâte prophylactique Zircate®

## Matériau de nettoyage et de polissage

### INDICATIONS

La pâte prophylactique Zircate est conçu pour le nettoyage et le polissage efficaces de la structure de la dent avec un effet abrasif minimal.

**Important :** Selon la loi fédérale américaine ce produit ne peut être vendu que par ou sur la demande d'un dentiste.

### COMPOSITION

La pâte prophylactique Zircate est composée d'une base aqueuse parfumée à la menthe contenant du ciment au silicate de zirconium en particules de tailles triées et contrôlées.

### CONTRE-INDICATIONS

La pâte prophylactique Zircate est contre-indiquée chez les patients allergiques à l'un de ses composants.

### AVERTISSEMENTS

A la suite d'un contact avec les yeux, la pâte prophylactique Zircate peut provoquer une irritation. En cas de contact, rincer abondamment les yeux à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation ou la gêne persiste.

### PRECAUTIONS

1. Toutes les surfaces des dents doivent être soigneusement nettoyées pour retirer le calcul.
2. Tous les examens et radiographies requis doivent être effectués avant de procéder à la prophylaxie avec la pâte prophylactique Zircate.
3. Porter des lunettes et des gants de protection lors de l'utilisation.

### INSTRUCTIONS ETAPE PAR ETAPE

1. Dispenser la pâte prophylactique Zircate dans un récipient dappen ou tout autre récipient approprié. Une pompe à salive peut vous être utile pendant que vous procédez à la prophylaxie.
2. Remplir de pâte la tête en caoutchouc que vous allez utiliser pour la prophylaxie. Avant de mettre la pièce à main en marche, porter la pâte au champ de l'intervention et en déposer une petite quantité sur la surface de chaque dent. Il est nécessaire d'appliquer de la pâte fraîche sur chaque surface afin d'obtenir des performances de nettoyage optimales.
3. Faire fonctionner la tête en caoutchouc à VITESSE REDUITE sur chaque surface de dent pendant environ 10 secondes. Vous assurer que le bord de la tête atteint le sulcus gingival sous la marge libre gingivale. Poursuivre cette procédure jusqu'à ce que toutes les surfaces exposées des dents soient soigneusement nettoyées et polies.
4. Une tête en caoutchouc ou une brosse à poils souples peut être utilisée pour les surfaces occlusales.

### CONSEIL TECHNIQUE

Utiliser du fil dentaire non poissé pour retirer l'excédent de pâte prophylactique Zircate des zones interproximales.

### CONSERVATION

Refermer le tube à l'aide du bouchon après chaque utilisation. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 25 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

©1998 DENTSPLY International Inc. Tous droits réservés.

DENTSPLY Caulk  
DENTSPLY International Inc.  
Milford, DE 19963-0359

DENTSPLY DeTrey GmbH ; De-Trey Straße 1, 78467 Constance, ALLEMAGNE  
Tél. : +49 75 31/5 83-0

Imprimé aux U.S.A.

577003 (R-5/98)